

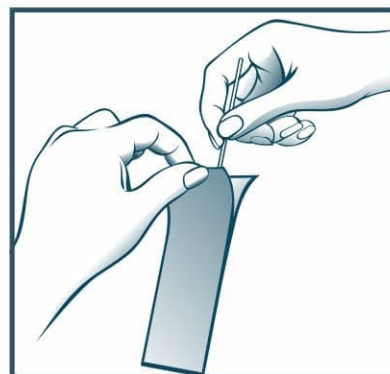


Инструкция

по самостоятельному взятию образцов биологического материала в домашних условиях для последующего проведения анализа ДНК

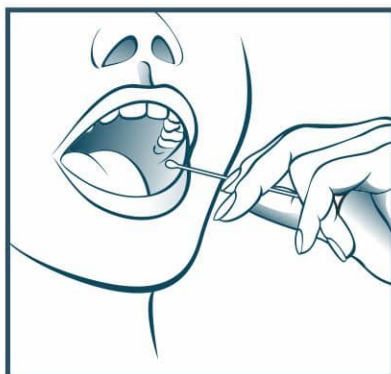

При возникновении вопросов по забору образцов ДНК, а также для записи в лабораторию или вызова курьера звоните: **+7 (495) 125 15 52** (с 9:00 до 21:00 без выходных)

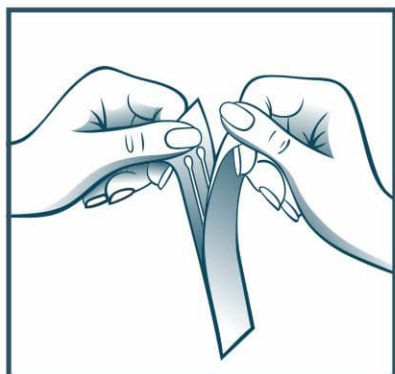

В точности следуйте указаниям. В противном случае может потребоваться повторное взятие образцов. Взятие образцов ДНК должно проводиться либо до еды, либо не ранее чем через час после еды. У детей, находящихся на грудном вскармливании, образцы берутся не ранее, чем через 2 часа после кормления.

1. Подпишите Конверт для мазков, и укажите информацию об образце.
2. Тщательно вымойте руки с мылом. Аккуратно откройте упаковку с зондами для взятия образцов ДНК, возьмите один зонд, держа за пластиковый стержень. **ДЕРЖИТЕ ЗОНД ТОЛЬКО ЗА ПЛАСТИКОВЫЙ СТЕРЖЕНЬ. НЕ КАСАЙТЕСЬ ВАТНОЙ ЧАСТИ.**
3. Широко откройте рот, введите зонд в ротовую полость и аккуратно потрите зондом с внутренней стороны одной из щек 10-20 раз, при этом медленно поворачивая его для сбора ротовых (буккальных) клеток.
4. Поместите зонд прямо в подписанный конверт для образцов ДНК.
5. Повторите тоже самое со вторым зондом и поместите его в ТОТ ЖЕ конверт
6. Оторвите защитную ленту на клапане конверта для образцов ДНК и заклейте его. Ни в коем случае не используйте слюну для заклейки конверта!
7. Повторите пункты 1 - 6 для другого участника теста.
8. Отправьте образцы ДНК в лабораторию, воспользовавшись курьерской доставкой или запишитесь на прием.